

ID Link DicomViewer簡易操作マニュアル


① 表示したい画像の『イメージID』をクリック

イメージID	施設名	イメージ種別	イメージ作成日	他ベンダビューア
6160719	アモ市立病院 (開示)	CR : 6	2008-08-21	6160719
6160720	アモ市立病院 (開示)	MR : 110	2008-08-19	6160720
6160718	アモ市立病院 (開示)	PT/CT : 680	2004-07-21	6160718
6141730	アモ市立病院 (開示)	MR : 59	2004-03-05	6141730

- ①Dicomダウンロード
- ②全画面表示
- ③白黒反転
- ④回転
- ⑤シネ表示
- ⑥長さ計測
- ⑦WL/WW変更
- ⑧部分拡大
- ⑨再読み込み




② 表示したいシリーズのサムネイルを右側へドラッグ

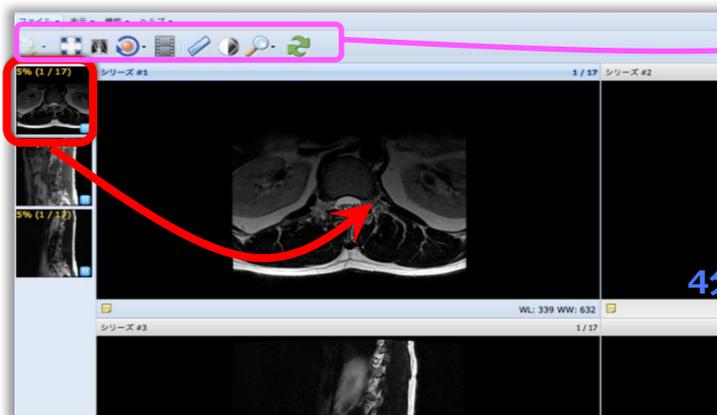

シリーズ内に複数画像がある場合は先頭画像のみ表示されています。
ドラッグすることにより、読み込みが開始されます。

画像上でダブルクリックすると、
4分割画面⇔1画面と切り替わります。

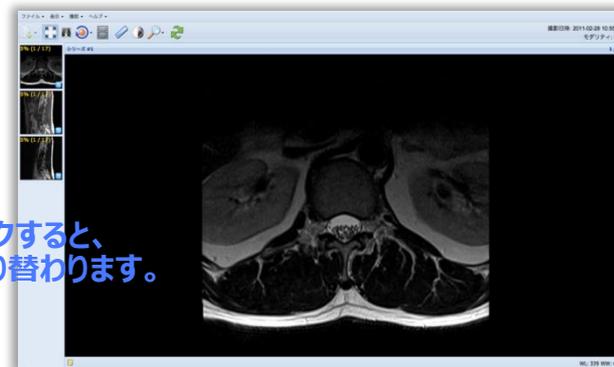

シリーズ内に複数画像がある場合は、
マウスのスクロールボタンを動かすと
次画面へ展開します。

